



# Schild Line


## GESICHTSMASKEN

### Gebrauchsanweisung

#### Anweisungen zur Verwendung:



1. Vor dem Anbringen der Maske, waschen Sie ihre Hände mit Seife oder tragen Handdesinfektionsmittel mit Wasser- oder Alkoholbasis auf.
2. Platzieren Sie die weiße Seite der Maske so, dass sie Nase und Mund vollständig bedeckt. Ziehen Sie an beiden Seiten der Ohrbänder und legen Sie eines hinter jedes Ohr.
3. Der verstellbare Nasenbügel muss am Nasenrücken sitzen und die Unterseite der Maske muss unter dem Kinn befestigt werden. Dadurch wird sichergestellt, dass er Ihre Nase und Ihren Mund perfekt bedeckt.
4. Nehmen Sie die Maske ab, indem Sie an den Bändern ziehen. Berühren Sie nicht die vordere blaue Seite der Maske.
5. Nachdem Sie die Maske abgenommen haben, entsorgen Sie sie sofort.

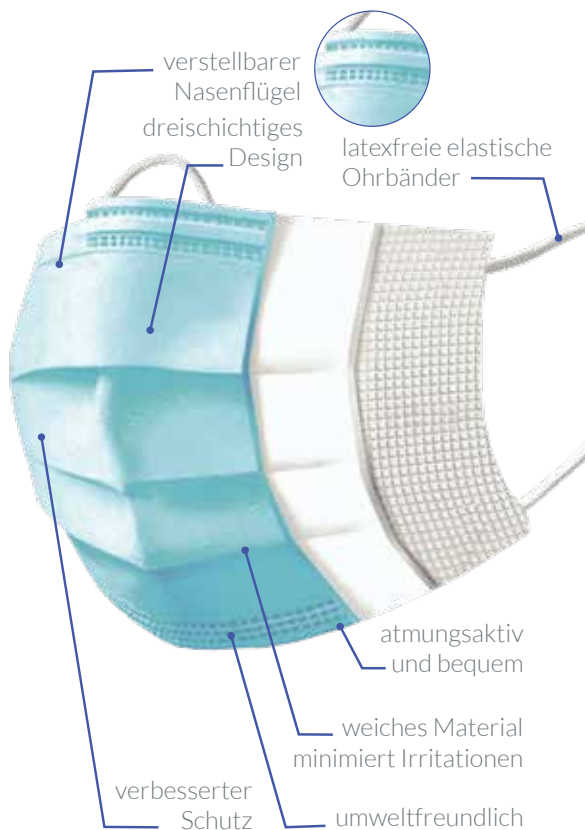

#### Vorsichtsmaßnahmen:

- Diese Maske ist nicht wiederverwendbar. Sie muss unmittelbar nach einem Tag des Gebrauchs entsorgt werden.
- Wenn Sie während des Tragens der Maske eine unerwünschte Reaktion feststellen, hören Sie bitte sofort auf, sie zu benutzen.
- Lagern Sie die Maske an einem trockenen Ort und halten Sie sie von brennbaren Gegenständen fern.
- Überprüfen Sie vor dem Gebrauch das Gültigkeitsdatum der Maske.

#### Empfehlungen zur Anwendung:

Es wird empfohlen, diese Masken in Geschäften und Einkaufszentren in öffentlichen Verkehrsmitteln, bei Besprechungen und an Arbeitsplätzen zu verwenden, an denen ein Arbeiten aus der Ferne nicht möglich ist.